



## Bacillo<sup>®</sup> Zero Tissues

**Auf organischen Säuren basierende, umfangreich wirksame und materialschonende Reinigungs- und Desinfektionstücher.**



### Anwendungsgebiete / Zweckbestimmung

Reinigende Desinfektion von nicht invasiven Medizinprodukten. Reinigende Desinfektion von invasiven Medizinprodukten, nicht jedoch als letzter Schritt der Aufbereitung.

Bacillo<sup>®</sup> Zero Tissues eignen sich zur unkomplizierten, materialschonenden Schnelldesinfektion von:

### Flächen gem. Biozidproduktregistrierung (BPR), wie:

- Displays und Tastaturen bzw. Bedienfelder empfindlicher Kommunikationsgeräte, z.B. Mobiltelefone, Computer
- empfindliche Oberflächen – z.B. aus Makrolon<sup>®</sup>, Acrylglass und Polysulfon sowie Kunstleder – in Einrichtungen des Gesundheitswesens

### Medizinischen Geräten und Inventar, wie:

- Displays und Tastaturen bzw. Bedienfelder empfindlicher mobiler und stationärer medizinischer Geräte, z.B. Überwachungsmonitore
- empfindliche nicht invasive Medizinprodukte, z.B. Mammografiegeräte, OP-Lampen

### Produkteigenschaften

- 100% plastikfreies Vliestuchmaterial
- Viruzid in 2 Minuten
- Frei von Alkoholen, quartären Ammoniumverbindungen, Peroxiden und von Parfüm- und Farbstoffen
- >98,5% organische Inhaltsstoffe
- Patentierte Formulierung – organic acid complex
- Keine Gefahrstoffkennzeichnung – ohne Handschuhe anwendbar\*
- Sehr gute Materialverträglichkeit

### Wirksamkeiten (hohe Belastung)

#### Bakterien / Pilze

Bakterizid / levurozid	VAH	5 Min.
	EN 13727 / EN 13624 / EN 16615	2 Min.

Tuberkulozid / mykobakterizid	EN 14348 / EN 16615	60 Min.
-------------------------------	---------------------	---------

#### Viren

Begrenzt viruzid	EN 14476 / EN 16615**	2 Min.
------------------	-----------------------	--------

Begrenzt viruzid PLUS	EN 14476 / EN 16615**	2 Min.
-----------------------	-----------------------	--------

Viruzid	EN 14476 / EN 16615**	2 Min.
---------	-----------------------	--------

\* Sofern Infektions- und Arbeitsschutz dies zulassen

\*\* Modifizierter 4-Felder Test

### Wirksamkeit

Bakterizid, levurozid, tuberkulozid, mykobakterizid, begrenzt viruzid (inkl. HBV, HIV, HCV), begrenzt viruzid PLUS, viruzid.

# Bacillo<sup>®</sup> Zero Tissues



## Anwendung

Oberflächen mit den Bacillo<sup>®</sup> Zero Tissues sorgfältig abwischen. Auf vollständige Benetzung achten, damit der optimale Desinfektionserfolg gewährleistet ist. Aufgrund ihrer Zusammensetzung können die Bacillo<sup>®</sup> Zero Tissues auch ohne Handschuhe eingesetzt werden, sofern Infektions- und Arbeitsschutz dies zulassen.

Nach Gebrauch Tissue der Abfallentsorgung zuführen.

Um das vorzeitige Austrocknen der Tücher zu verhindern, Tücherverpackung direkt nach Gebrauch wieder verschliessen.

Keine Desinfektionsmittellösung in das Innere elektrischer Geräte gelangen lassen. Die Angaben des Geräteherstellers sind zu beachten.

Zur einmaligen Verwendung.

Bei Produktwechsel ist eine Zwischenreinigung durchzuführen.

## Haltbarkeit

In geöffnetem und wieder fest verschlossenem Flowpack: 3 Monate.

## Zusammensetzung

(+)-Weinsäure mit 5 mg/g und Natriumbenzoat mit 5 mg/g

## Listung

VAH, IHO-Desinfektionsmittelliste

## Chemisch-physikalische Daten

Die Angaben beziehen sich auf die Tränkflüssigkeit Bacillo<sup>®</sup> Zero:

Flammpunkt  
(DIN EN ISO 3679) nicht entflammbar  
Dichte (20 °C) 1 g/cm<sup>3</sup>  
pH-Wert (20 °C): 2,1–2,4

Produktname	Packungsinhalt	Artikelnummer
<b>Bacillo<sup>®</sup> Zero Tissues</b>	100 Tücher Flowpack Grösse 20 x 17 cm	981935
<b>Flowpack Wandhalter</b>	1 Wandhalter	981205
<b>Flowpack-Halter flex</b>	1 Halter	981899

Die Empfehlungen zu unseren Präparaten beruhen auf wissenschaftlichen Prüfungen und werden nach bestem Wissen gegeben. Weitergehende Empfehlungen, z. B. im Hinblick auf Materialverträglichkeit, sind nur im Einzelfall gesondert möglich. Unsere Empfehlungen sind unverbindlich und keine Zusicherung. Sie schliessen die eigene Prüfung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke nicht aus. Insoweit können wir keine Haftung übernehmen. Diese richtet sich nach unseren allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

*Flächendesinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.*



Helps. Cares. Protects.

**IVF HARTMANN AG**  
Victor-von-Brunns-Str. 28  
CH-8212 Neuhausen  
Tel. +41 (0)52 674 31 11

[info@ivf.hartmann.info](mailto:info@ivf.hartmann.info)  
[www.ivf.hartmann.info](http://www.ivf.hartmann.info)