

# Urinalkondom-Musterset

## Gebrauchsanleitung

Sehr geehrter Anwender

Das Urinalkondom ist ein bewährtes Hilfsmittel für den Mann mit Blasenschwäche. Dabei wird der Urin durch ein Kondom mittels Schlauch in einen Urinbeutel abgeleitet.

Dieses Musterset soll Ihnen einen Eindruck über die Funktion des Urinalkondoms vermitteln. Die folgende Anleitung hilft Ihnen dabei Schritt für Schritt, das Urinalkondom korrekt anzuwenden.

Das Set enthält drei verschiedene Grössen in je zwei Ausführungen. **Weitere Grössen können Sie bei Bedarf kostenlos bei uns nachbestellen.**

**Wenden Sie sich bei Fragen dazu bitte an unsere Fachpersonen:**

**056 484 15 00**

Montag bis Freitag, 7-17 Uhr

Freundliche Grüsse  
Publicare AG

# Überblick

## Urinalkondom-MusterSet

Einweg-Rasierer  
Kai

PC 1054



Schublehre  
Hollister



Befestigungsbänder  
Coloplast Conveen

CP 050501



Beinbeutel 500 ml  
Hollister

H 9652



Bettbeutel 1500 ml  
Coloplast Conveen

CP 050620



## Urinalkondome im Überblick

Sauer Comfort  
Kurz –  
Standard 30mm SA 97.30



Bard Spirit Style 2 intermed  
32mm RE 37303  
–



Hollister InCare InView  
25mm H 97125  
25mm H 97225



Coloplast Conveen Optima  
30mm CP 221300  
28mm CP 220280



## Vorbereitung



### Das Urinalkondom nur bei intakter Haut anwenden.

Den Penis mit milder Seife und klarem Wasser gründlich reinigen. Die Haut sorgfältig abtrocknen. Keine Öle, Lotionen oder Puder verwenden. Die Schamhaare unmittelbar um den Penis und auf dem Hodensack (Skrotum) vorsichtig mit dem Einweg-Rasierer **PC 1054** entfernen.

**INFO:** Achten Sie darauf, dass die Haut trocken und fettfrei ist, damit das Urinalkondom sicher haftet.



Mit der Schublehre den Durchmesser des Gliedes am Penischaft messen. Das passende Kondom wählen:

**Kurz:** 25 mm **H 97125**; 30 mm **CP 221300**; 32 mm **RE 37303**  
**Standard:** 25 mm **H 97225**; 28 mm **CP 220280**; 30 mm **SA 97.30**

**INFO:** Urinalkondome gibt es in den Ausführungen «kurz» und «standard» (verfügbare Grössen: 18–41 mm Durchmesser). Dieses Musterset enthält je drei Grössen. Weitere Grössen können bei Publicare als Muster kostenlos nachbestellt werden.

## Anbringen des Urinalkondoms




Das Kondom an der Eichel ansetzen und darauf achten, dass die Harnröhrenöffnung einen sicheren Abstand (ca. 1–2 cm) zum Ablauf des Kondoms hat. Die Vorhaut in natürlicher Position belassen und Penis durch leichtes Ziehen an der Vorhaut straffen.

**TIPP:** Drücken Sie die Spitze des Kondoms zusammen. So wird sichergestellt, dass sich ein Reservoir zwischen Eichel und Ablass für das sichere Abfließen des Urins bildet.



Mit der anderen Hand das Kondom langsam und möglichst glatt über das Glied abrollen oder falls vorhanden, die Lasche des Abrollstreifens zu sich heranziehen. Für einen sicheren Halt das Kondom mit der Hand umfassen und kurz andrücken.

## Anbringen des Beinbeutels

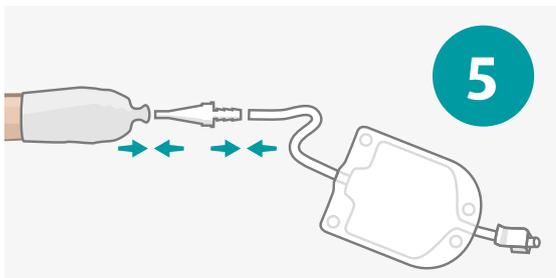


Das Kondom an das Ableitungssystem (Beinbeutel **H 9652**) anschliessen.

**TIPP:** Es ist wichtig, dass Sie den Konnektor (Verbindungsstück) des Beinbeutels fest mit dem Ende des Kondoms verbinden.


**INFO:** Schlauchlänge kann individuell gekürzt werden.



Den Beutel mit den Befestigungsbändern **CP 050501** am Bein fixieren.

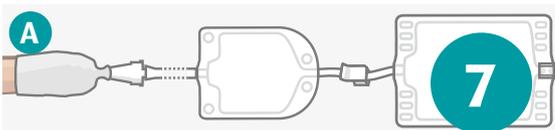


Beinbeutel, welche tagsüber verwendet werden, haben abhängig vom jeweiligen Beutel eine Aufnahmekapazität von 500–800 ml. Damit der Beutel während der Nacht nicht geleert werden muss, stehen Ihnen folgende zwei Optionen zur Verfügung:

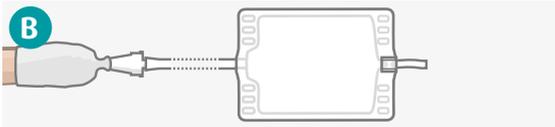

- A** Beinbeutel mit dem Bettbeutel **CP 050620** verbinden.
- B** Ableitungssystem direkt mit dem Bettbeutel **CP 050620** verbinden (ohne den Beutel am Bein).

## Entfernen des Urinalkondoms

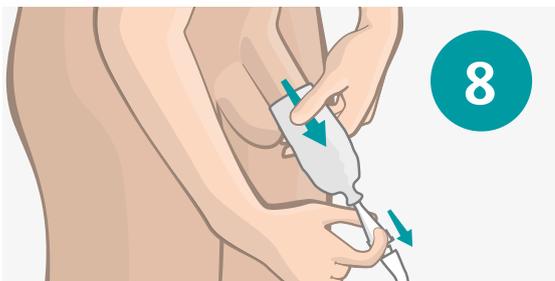

Den angeschlossenen Urinbeutel vom Kondom lösen. Das Kondom durch sanftes Abrollen über die gesamte Penislänge von der Haut lösen.

Das Kondom alle 24 Stunden wechseln.

**TIPP:** Falls das Kondom zu stark klebt, können Sie es mit warmem Wasser oder Klebentferner (bei Publicare erhältlich) einfach lösen.

Einfach. Diskret. Bewährt.

••• publicare

**Publicare AG** | Vorderi Böde 9 | 5452 Oberrohrdorf  
Telefon 056 484 15 00 | Fax 056 484 15 11  
info@publicare.ch | www.publicare.ch