

Set di prova per catetere esterno

Istruzioni per l'uso

Gentile utente,

il catetere esterno è uno strumento di supporto affidabile per gli uomini affetti da incontinenza. È costituito da una guaina urinaria, che fa confluire l'urina attraverso un tubicino fino a una sacca di raccolta.

Il presente set di prova ha lo scopo di farle conoscere il funzionamento del catetere esterno. Le istruzioni seguenti, inoltre, la aiuteranno a utilizzarlo correttamente passo dopo passo.

Il set comprende tre misure diverse, ognuna in due versioni. **In caso di necessità, potrà ordinare gratuitamente altre misure.**

Per qualsiasi domanda la preghiamo di rivolgersi al nostro personale specializzato:

056 484 15 00

dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 17

Cordiali saluti
Publicare AG

Panoramica

Set di prova per catetere esterno

Lametta monouso
Kai

PC 1054



Calibro a corsoio
Hollister



Fascette di fissaggio
Coloplast Conveen

CP 050501



Sacca di raccolta da gamba
500ml Hollister

H 9652



Sacca di raccolta da notte
1500ml Coloplast Conveen

CP 050620



Panoramica delle guaine

Sauer Comfort

Corta

-

Standard

30mm

SA 97.30



Bard Spirit Style 2 intermed

32mm

RE 37303

-



Hollister InCare InView

25mm

H 97125

25mm

H 97225



Coloplast Conveen Optima

30mm

CP 221300

28mm


CP 220280



Istruzioni per l'uso del set: catetere esterno

... pubblicare


Preparazione

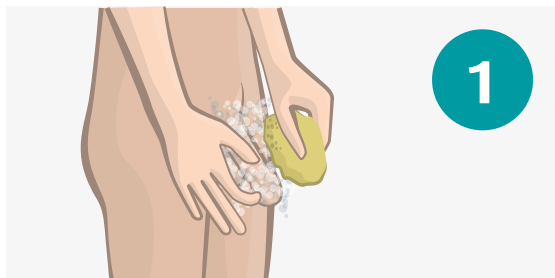

Utilizzare la guaina solo sulla pelle intatta.

Lavare accuratamente il pene con sapone neutro e acqua pulita. Asciugare accuratamente la pelle. Non utilizzare oli, lozioni o talco. Servendosi della lametta monouso **PC 1054**, rimuovere con attenzione i peli pubici intorno al pene e sullo scroto.

NOTA: la pelle deve essere completamente asciutta e pulita affinché la catetere esterno vi aderisca perfettamente.

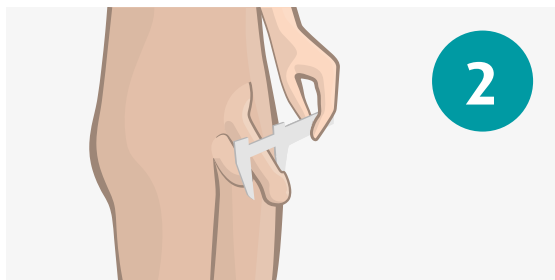

Con il calibro a corsoio, misurare il diametro del membro in corrispondenza del fusto. Scegliere la guaina appropriata:

corta: 25 mm **H 97125**; 30 mm **CP 221300**; 32 mm **RE 37303**

standard: 25 mm **H 97225**; 28 mm **CP 220280**; 30 mm **SA 97.30**

NOTA: catetere esterno sono disponibili nelle versioni «corta» e «standard» (misure disponibili: diametro 18–41 cm). Il presente set di prova contiene tre misure per ogni versione. È possibile ordinare gratuitamente campioni di altre misure da Pubblicare.

Applicazione della guaina




Applicare la guaina al glande facendo attenzione a mantenere una certa distanza (1-2 cm circa) tra l'orifizio uretrale e il tubicino di scarico della guaina. Lasciare il prepuzio in posizione naturale e tendere il pene in corrispondenza del prepuzio tirando leggermente.

CONSIGLIO: comprimere l'estremità della guaina per garantire che tra il glande e lo scarico si crei un serbatoio per il corretto deflusso dell'urina.



Con l'altra mano, stendere la guaina lungo il pene lentamente e accuratamente o, se presente, tirare verso di sé il collarino della guaina. Per una corretta tenuta della guaina, avvolgerla con una mano e stringere brevemente.


Applicazione della sacca di raccolta da gamba

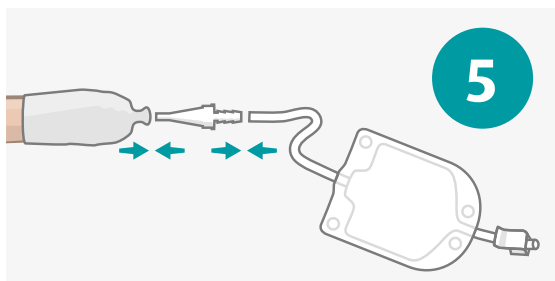


Collegare la guaina al sistema di drenaggio (sacca di raccolta da gamba **H 9652**).

CONSIGLIO: è fondamentale fissare bene il connettore (elemento di raccordo) della sacca di raccolta all'estremità della guaina.


NOTA: la lunghezza del tubo può essere accorciata in base alle proprie esigenze.

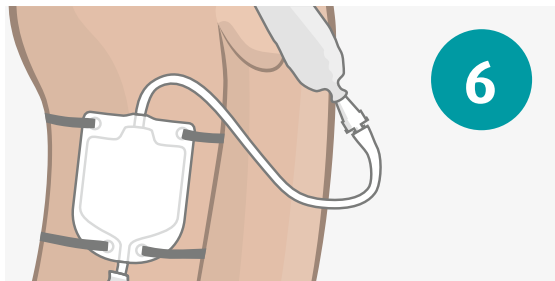

Fissare la sacca di raccolta alla gamba utilizzando le fascette di fissaggio **CP 050501**.

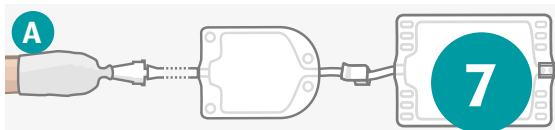


Le sacche di raccolta da gamba che si utilizzano durante il giorno hanno una capacità di 500-800 ml, a seconda della sacca utilizzata. Di notte, per non dover svuotare la sacca, è possibile scegliere tra due opzioni:

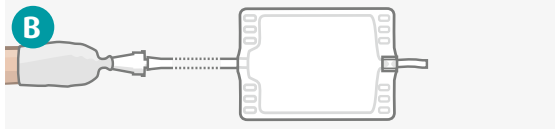

- A** collegare la sacca da gamba a una sacca da notte **CP 050620**.
- B** collegare il sistema di drenaggio direttamente alla sacca da notte **CP 050620** (senza sacca da gamba).

Rimozione della guaina

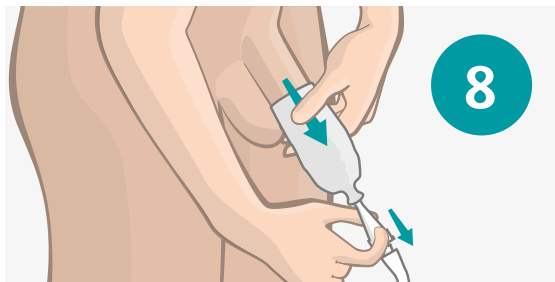

Staccare la sacca di raccolta dalla guaina. Srotolandola delicatamente, staccare la guaina dalla pelle lungo tutto il pene.

Sostituire la guaina ogni 24 ore.

CONSIGLIO: se la guaina aderisce troppo, per facilitarne la rimozione utilizzare acqua calda o un remover di adesivo (disponibile da Publicare).

