



Scegli eakin dot® Sistema a due pezzi per problemi della cute peristomale

4 motivi per usarlo:

1. Scegliere il sistema adatto è molto importante per il proprio recupero dopo aver subito una stomia.¹
2. L'obiettivo comune al paziente ed al personale medico è di raggiungere un tempo d'uso prevedibile ed affidabile.²
3. L'irritazione della cute peristomale è una complicazione abbastanza frequente quando si deve gestire uno stoma.
4. I problemi della cute peristomale possono essere evitati grazie all'utilizzo del corretto sistema di sacche.^{3,4}

Caso di studio presentato da:

Bataa EL-Erakey,
Infermiere Specializzato in Stoma,
Australia

Referenze:

1. Williams J, Gwillian B, Sutherland N, Matten J, Hemmingway J, Ilsey H et al (2010) Evaluating skin problems in people with stomas. BJN 19(17): s6-15 2. Wound, Ostomy, Continence Nurses Society(WOCN). (2013) Colostomy and Ileostomy: Products and tips. Mt. Laurel, NJ: WOC 3. Wound, Ostomy, Continence Nurses Society(WOCN). (2016) Peristomal skin complications: Best practice for clinicians. 4. Hooper J (2018) Ostomy: Choosing the Right Appliance. Wound Care Education Institute www.woundcentral.com

Storia Clinica del paziente:

- Il Signor PF era affetto da tumore rettale
- APER con formazione di una colostomia finale
- Al momento della dimissione dall'ospedale utilizzava un sistema ad una sacca drenabile convesso

Problemi:

- Alternanza di movimenti intestinali con perdite di solidi
- Difficoltà nel drenare la sacca con fuoriuscite solide
- Troppi cambi di sacca a causa delle perdite
- Presenza di fuoriuscite
- Sviluppo di escoriazioni sulla cute peristomale



Riesame dell'infermiere:

- Cute Peristomale con **escoriazioni**
- Sensazione di **disagio**
- **Perdite** da fuoriuscite imprevedibili
- **Difficoltà** nel posizionare accuratamente il sistema ad un pezzo

L'infermiere raccomanda eakin dot® Sistema a due pezzi:

- Varie opzioni di sacca **flessibile** per far fronte alle fuoriuscite.
- **skinsmart™** idrocolloide a lunga durata
- Un posizionamento **accurato e facile** della **placca** riduce problemi di infiammazione della cute peristomale e previene le perdite

Risultati:

- Cute peristomale **migliorata**
- **Nessuna Perdita**
- **Facile da utilizzare**
- **Possibilità di alternare** con facilità sacche chiuse a sacche drenabili a seconda del tipo di fuoriuscita

Evidenze cliniche dopo aver scelto eakin dot® sistema a due pezzi:

- **Miglioramento** dei problemi della cute peristomale
- **Facile da usare**
- **skinsmart™** idrocolloide a lunga durata
- Soddisfa le singole esigenze di ogni paziente stomizzato



A SMALL PART
OF A BIGGER LIFE

eakin dot®

Scegli eakin dot® Sistema a due pezzi dopo la riparazione di un'ernia paracolostomica

4 motivi per utilizzarlo:

1. Scegliere il sistema adatto è molto importante per il proprio recupero dopo aver subito una stomia.¹
2. L'obiettivo comune al paziente ed al personale medico è di raggiungere un tempo d'uso prevedibile ed affidabile.²
3. Le ernie paracolostomiche rappresentano una delle maggiori complicazioni tra i pazienti stomizzati.³ Con una incidenza stimata tra il 25 ed il 50%.⁴
4. Il decorso postoperatorio non è sempre semplice; alcuni pazienti stomizzati necessitano di un cambio di prodotti a causa del dolore e della gestione delle ferite.

Caso di studio presentato da:

Felicity Rackham / Liz Meakin
Infermiere Clinico Specializzato in Terapia per Stoma
Epworth Eastern Hospital Australia

Referenze:


1. Williams J, Gwilliam B, Sutherland N, Matten J, Hemmingway J, Ilsey H et al (2010) Evaluating skin problems in people with stomas. BJN 19(17): s6-15 2. Wound, Ostomy, Continence Nurses Society(WOCN). (2013) Colostomy and Ileostomy: Products and tips. Mt. Laurel, NJ: WOCN 3. Burch J, 2018 Nursing strategies for the prevention and management of parastomal hernias. Gastrointestinal Nursing 16(2) 38-42 4. Thompson MJ, Trainor B (2005) Incidence of parastomal hernia before and after a prevention programme 3(2):23-27

Storia Clinica del Paziente:

- Signora A – 73 anni, donna, sottoposta ad un intervento di riparazione di un'ernia paracolostomica
- La paziente era entusiasta di riprendere ad utilizzare, subito dopo l'operazione, il sistema a due pezzi convesso con il quale aveva già familiarità

Problemi:

- Un dolore persistente sul lato sinistro dello stoma lascia presupporre che la convessità esercitasse una pressione sulla maglia interna
- Perdite dovute alla superficie irregolare dello stoma

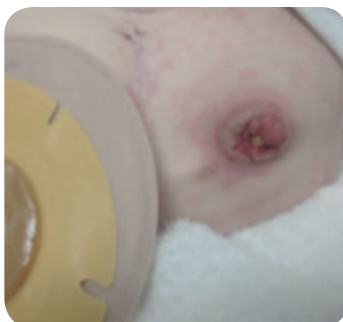

Riesame dell'infermiere:


- Danneggiamento della cute circostante lo stoma
- Ecchimosi e cute fragile ad ore tre della flangia convessa.
- Lesioni cutanee correlate agli adesivi medicali (MARSI) lungo i margini della flangia dovuti ai cambi frequenti del sistema

L'infermiere raccomanda eakin dot® Sistema a due pezzi:

- Diminuzione del dolore e dei lividi sulla maglia laterale
- La Signora A ha subito avvertito una sensazione di comfort nel gestire il sistema da sola a casa

Risultati:

- Dopo due settimane di utilizzo del sistema a due pezzi eakin dot® con un sigillante sotto la placca la Signora A ha riscontrato un miglioramento della cute
- La cute è ulteriormente migliorata delle settimane successive

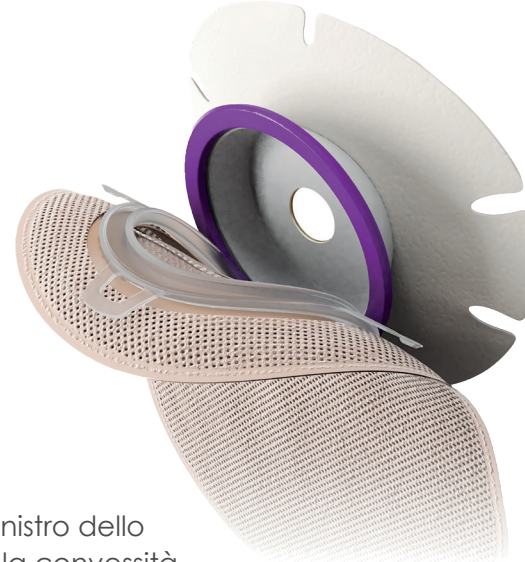

eakin dot®

A SMALL PART
OF A BIGGER LIFE

Evidenze cliniche dopo aver scelto eakin dot® sistema a due pezzi:

- Miglioramento dei problemi della cute peristomale
- Facile da usare
- *skinsmart*™ idrocolloide a lunga durata
- Soddisfa le singole esigenze di ogni paziente stomizzato

eakin dot®

Scegli eakin dot®
Sistema a due
pezzi:
il punto di vista
dell'infermiere

4 motivi per utilizzarlo:

1. Scegliere il sistema adatto è molto importante per il proprio recupero dopo aver subito una stomia.¹
2. L'obiettivo comune al paziente ed al personale medico è di raggiungere un tempo d'uso prevedibile ed affidabile.²
3. Quando non è possibile essere indipendenti, la cura dello stoma deve essere affidato ad un parente o ad una figura professionale. Molti si sentono poco sicuri nel rimuovere i sistemi perché timorosi di causare danni alla cute peristomale dell'assistito.³
4. Il Sistema a due pezzi eakin dot® soddisfa i bisogni dei pazienti stomizzati e dei loro assistenti.

Caso di studio presentando da:


Kate Slattery,
Infermiere Esperto,
TG Eakin Ireland

Referenze:

1. Williams J, Gwillian B, Sutherland N, Matten J, Hemmingway J, Ilsey H et al (2010) Evaluating skin problems in people with stomas. BJN 19(17): s6-15 2. Wound, Ostomy, Continence Nurses Society(WOCN). (2013) Colostomy and Ileostomy: Products and tips. Mt. Laurel, NJ: WOCN 3. Black P (2011) The role of the carer and patient in stoma care. Nursing and Residential Care 13(9) 432-436

Storia Clinica del Paziente:

- Uomo di 80 anni, sposato
- Al Signor S nel mese di Gennaio è stato diagnosticato un tumore all'intestino
- Resezione anteriore dell'intestino e formazione di una ileostomia finale
- Complicanze post operatorie hanno ritardato i tempi di recupero e le dimissioni dall'ospedale
- Il Signor S è indipendente quando ha la sacca vuota, ma necessita della totale assistenza della moglie al momento del cambio della stessa

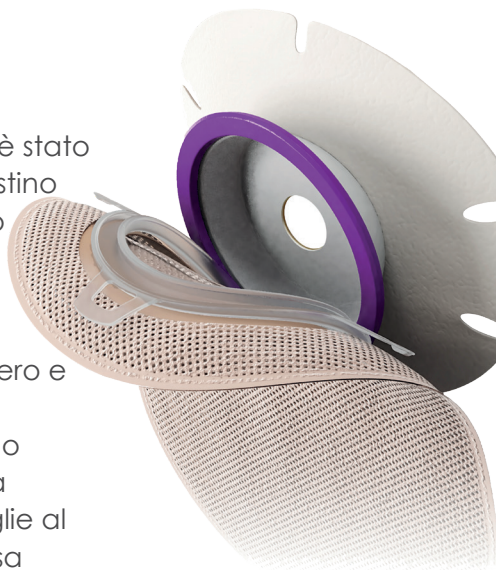

Riesame dell'infermiere:

- Il Signor S ha iniziato ad utilizzare un sistema convesso senza sigillante
- Il Signor S e sua moglie era stati informati sul fatto che il cambio della sacca doveva avvenire ogni 2-3 ma spesso tra un cambio e l'altro sono passati anche 5 giorni.
- Si sono verificate perdite ed irritazioni della cute

L'infermiere raccomanda eakin dot® Sistema a due pezzi:

- Sistema a due pezzi eakin dot® in combo con il sigillante Cohesive SLIM®
- Nell'arco di due settimane la cute è quasi completamente cicatrizzata
- Non si sono verificate perdite
- Il Signor S e sua moglie cambiano la placca ogni 4-5 giorni e la sacca ogni giorno

Risultati:

- Una volta aver familiarizzato con il "click sonoro" del sistema, agganciare sacca e placca è diventata un'azione confortevole e sicura
- Entrambi sono veramente molto contenti di come il sistema a due pezzi eakin dot® sia molto sicuro, confortevole e facile da utilizzare

Evidenze cliniche dopo aver scelto eakin dot® sistema a due pezzi:

- Miglioramento dei problemi della cute peristomale
- Facile da usare
- skinsmart™ idrocolloide a lunga durata
- Soddisfa le singole esigenze di ogni paziente stomizzato e di chi si prende cura di loro.

eakin dot®

A SMALL PART
OF A BIGGER LIFE




Scegli eakin dot® Sistema a due pezzi per gestire uno stoma nel lungo termine

4 motivi per utilizzarlo:

1. Scegliere il sistema adatto è molto importante per il proprio recupero dopo aver subito una stomia.¹
2. L'obiettivo comune al paziente ed al personale medico è di raggiungere un tempo d'uso prevedibile ed affidabile.²
3. La gestione di problemi di salute nel lungo termine può avere un impatto significativo sulla possibilità che le persone hanno di vivere una vita normale.³
4. I problemi di salute nel lungo termine possono limitare con il tempo la capacità delle persone di gestire in totale indipendenza la cura della propria salute. Nel momento in cui si raccomanda un prodotto bisogna quindi considerare attentamente la situazione di ogni singolo individuo per permettere a persone stomizzate di raggiungere un ottimo livello di manutenzione ed indipendenza.³

Storia Clinica del Paziente:

- Uomo, 75 anni, limitate capacità motorie, vive da solo
- Affetto da Tumore Rettale
- APER con formazione di colostomia finale
- Affetto dal Morbo di Parkinson, disordine bipolare, ipertensione, stenosi aortica ed osteoartriti

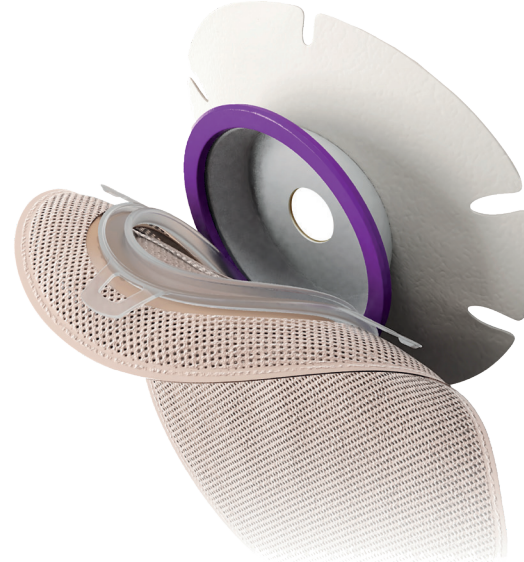

L'infermiere raccomanda eakin dot® Sistema a due pezzi:

- L'infermiere specializzato valuta le abilità dell'individuo ha consigliato il sistema a due pezzi eakin dot® nella fase immediatamente successiva al post operatorio
- Paziente controllato 3 settimane dopo l'operazione

Riesame dell'infermiere:

- Riporta di non aver avuto perdite con l'utilizzo del sistema a due pezzi eakin dot®
- Tutto ciò ha avuto un ruolo positivo sul livello di confidenza personale
- La cute peristomale è in salute
- Gestisce in autonomia la cura dello stoma e del dispositivo
- La placca viene cambiata una volta ogni 3-4 giorni
- Afferma di "amare le sue sacche", in particolar modo il sistema con aggancio semplice in cui il "click sonoro" conferma che la sacca è ben posizionata



Risultati:

- Riesce a gestire molto bene il dispositivo senza problemi o perdite
- Lo stoma mantiene un ottimo colorito ed ha una circonferenza di 30mm
- La cute peristomale è intatta
- Nonostante il tremore crescente causato dal Morbo di Parkinson è in grado di allineare facilmente placca e sacca

Evidenze cliniche dopo aver scelto eakin dot® sistema a due pezzi:

- Miglioramento dei problemi della cute peristomale
- Facile da usare
- *skinsmart*™ idrocolloide a lunga durata
- Soddisfa le singole esigenze di ogni paziente stomizzato

Caso di studio presentato da:

Kelly Vickers,
Infermiere Specializzato in Terapia per Stoma
Lyell McEwin Hospital, Adelaide,
South Australia.

Referenze:

1. Williams J, Gwilliam B, Sutherland N, Matten J, Hemmingway J, Ilsey H et al (2010) Evaluating skin problems in people with stomas. BJN 19(17): s6-15 2. Wound, Ostomy, Continence Nurses Society(WOCN). (2013) Colostomy and Ileostomy: Products and tips. Mt. Laurel, NJ: WOC 3. Readding L (2016) Practical guidance for nurses caring for patients with long-term conditions. British Journal of Community Nursing21(2) 90-98



A SMALL PART
OF A BIGGER LIFE