


# Mode d'emploi du set d'échantillons d'étuis péniens

Nous sommes votre partenaire  
pour le conseil et la fourniture de  
dispositifs médicaux



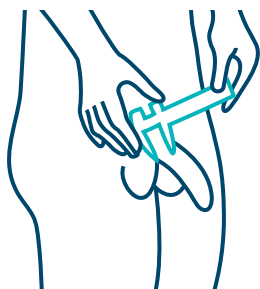

# 1

## Préparation

Lavez le pénis avec du savon doux et de l'eau et séchez-le parfaitement.

Rasez les poils pubiens tout autour du pénis et au niveau du scrotum à l'aide du **rasoir à usage unique 4PY0715**.

Mesurez le diamètre du corps du pénis à l'état flaccide à l'aide du  **pied à coulisse**.

Sélectionnez l'étui correspondant au diamètre et à la longueur du pénis :

Diamètre	Court	Standard
25 mm	H 97125	-
29 mm	-	H 97229
30 mm	SA 97.6001.30	SA 97.30

## Information

Vous pouvez commander gratuitement des échantillons comportant d'autres diamètres (de 18 à 41mm).

## Important

N'appliquez pas l'étui pénien sur une peau irritée ou blessée. N'utilisez pas d'huile, de lotion ou de poudre.




# 2

## Pose

L'étui pénien est appliqué sur le pénis à l'état flaccide.

Appliquez l'étui sur le gland. Pincez l'extrémité de l'étui. Un petit réservoir se forme, qui garantit le bon écoulement de l'urine. Veillez laisser un espace de 1 à 2 cm entre le gland et le fond de l'étui.


Laissez le prépuce en position naturelle et tendez la peau du pénis en tirant légèrement au niveau du prépuce.

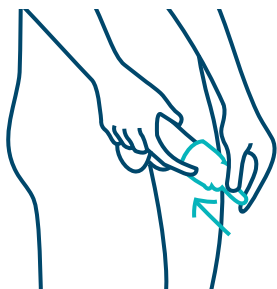

# 3

## Déroutement

D'une main, continuez de pincer l'extrémité de l'étui. De l'autre, déroulez l'étui le long du pénis en évitant la formation de plis. Exercez une pression sur le pourtour de l'étui déroulé pour garantir une bonne adhérence.

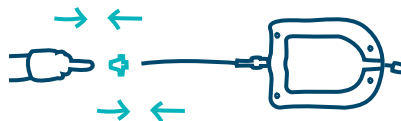

# 4

## Pose de la poche


Reliez l'étui à la tubulure de la **poche de jambe H 9652**.

La pièce de raccordement doit être solidement reliée à l'extrémité de l'étui.

Fixez la poche à la jambe avec les **lanières pour poche de jambe H 9625**.

### Conseil

Vous pouvez raccourcir la tubulure individuellement. Pour ce faire, retirez la pièce de raccordement, raccourcissez la tubulure avec des ciseaux puis repositionnez la pièce de raccordement.

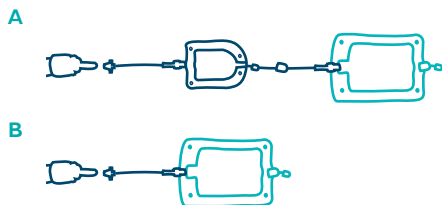

## 5

### Vidage de la poche

Selon le modèle, la poche de jambe a une contenance de 500 à 800 ml. Pour vider la poche, ouvrez la valve inférieure et laissez son contenu s'écouler dans les toilettes.

#### Remarque

Pour des questions d'hygiène, remplacez la poche urinaire au minimum tous les sept jours.

### Durant la nuit

Deux possibilités s'offrent à vous pour ne pas avoir à vider la poche pendant la nuit :

#### A

Reliez la **poche de lit H 9430-30**, de plus grande taille, à votre poche de jambe. Ouvrez la valve située sur la poche de jambe pour permettre à l'urine de s'écouler.

#### B

Reliez la **poche de lit H 9430-30** directement à l'étui.



## 6

### Retrait

Changez d'étui pénien au minimum toutes les 24 heures. Détachez la poche urinaire de l'étui puis enlevez l'étui en l'enroulant sur lui-même.

#### Conseil

Si l'étui pénien adhère fortement, vous pouvez le décoller facilement avec de l'eau chaude ou un dissolvant d'adhésif (disponible chez nous).

# **Voici comment utiliser correctement l'étui pénien**

**L'étui pénien est un produit médical éprouvé pour les hommes présentant une incontinence urinaire.**

**L'étui évacue l'urine dans la poche fixée à la jambe : de manière fiable et discrète.**

**Ce set d'échantillons vous permet de tester l'utilisation de l'étui pénien. Et si cela ne marche pas la première fois, ne vous inquiétez pas ! Avec le temps, vous arriverez de mieux en mieux à l'utiliser.**

**Aucune des tailles proposées dans le set d'échantillons ne vous convient ? Nous vous faisons parvenir gratuitement d'autres tailles.**


**Pour nous contacter :**

**Du lundi au vendredi**

**7h00 à 17h00**

**+41 56 484 15 00**

**[www.publicare.ch](http://www.publicare.ch)**



**Publicare AG**  
**Vorderi Böde 9**  
**5452 Oberrohrdorf**

**Téléphone +41 56 484 15 00**

**Fax +41 56 484 15 11**

**[info@publicare.ch](mailto:info@publicare.ch)**

**[www.publicare.ch](http://www.publicare.ch)**

## Dans le set d'échantillons



**Rasoir à usage unique**  
Mediware  
4PY0715



**Pied à coulisse**  
Hollister



**Lanière pour poche de jambe**  
Hollister  
H 9625



**Poche de jambe 500 ml**  
Hollister  
H 9652



**Poche de lit 2000 ml**  
Hollister  
H 9430-30

## Tous les étuis péniens



### Sauer Comfort

Court	30 mm	SA 97.6001.30
Standard	30 mm	SA 97.30



### Hollister InCare InView Special

Court	25 mm	H 97125
Standard	-	



### Hollister InCare InView Standard

Court	-	
Standard	29 mm	H 97229