


Istruzioni d'uso per set di modelli condom urinari

Siamo il vostro partner
per la consulenza e la fornitura
di presidi medici

 pubblicare

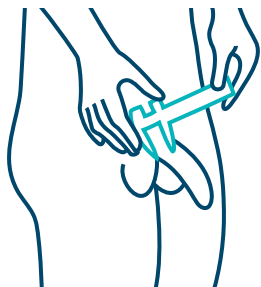

1

Preparazione

Lavate il pene con acqua e sapone delicato. Quindi asciugatelo a fondo.

Con il **rasoio monouso 4PY0715**, rasate i peli pubici presenti intorno al pene e sullo scroto.

Alla base del pene, calcolate il diametro del membro a riposo con l'ausilio del **calibro**.

Selezionate il condom urinario giusto in base al diametro e alla lunghezza del pene:

Diametro	Lunghezza ridotta	Lunghezza standard
25 mm	H 97125	-
29 mm	-	H 97229
30 mm	SA 97.6001.30	SA 97.30

Informazione

Ulteriori campioni con diametro tra 18–41mm sono disponibili gratuitamente da noi.

Importante

Non applicare il condom urinario sulla pelle ferita. Non utilizzate alcun olio, lozione o talco.




2

Applicazione

Il condom urinario dev'essere applicato sul pene a riposo.

Poggiate il condom sul glande comprimendone la punta. In questo modo si crea un piccolo spazio per il deflusso sicuro dell'urina. Tra il glande e il deflusso del condom dovrebbe essere mantenuta una distanza di 1–2 cm.


Lasciate il prepuzio nella sua posizione naturale e stirate la pelle del pene con leggeri movimenti sul prepuzio.

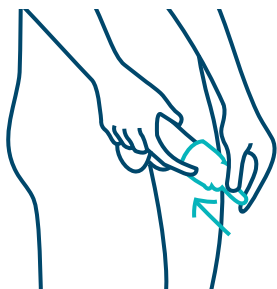

3

Srotolamento

Continuate a tenere la punta ferma con una mano. Con l'altra, srotolate del tutto il condom urinario sul membro. Per una tenuta sicura, avvolgetelo con la mano e stringetelo bene contro il pene.

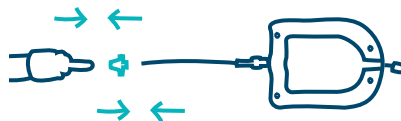

4

Attaccare la sacca


Attaccate il condom urinario al tubo flessibile della **sacca da fissare alla gamba H 9652**.

Il raccordo dev'essere attaccato saldamente all'estremità del catetere esterno.

Fissate alla gamba la sacca con il **laccio per sacca da gamba H 9625**.

Consiglio

La lunghezza del tubo flessibile è regolabile individualmente. Per farlo, staccate il raccordo. Quindi accorciate il tubo flessibile con delle forbici e riapplicate il raccordo.

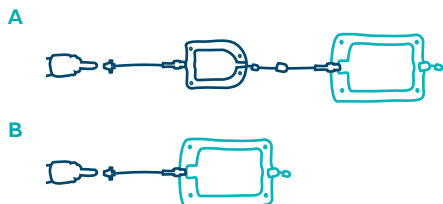

5

Svuotare la sacca

In base al modello, la sacca da fissare alla gamba ha una capienza di 500–800 ml.

Per svuotarla, aprite la valvola in basso e scaricatene il contenuto nel WC.

Indicazioni

Per motivi igienici, è necessario cambiare la sacca urinaria dopo un massimo di sette giorni.

Durante la notte

Per non svuotare la sacca durante la notte, avete due possibilità:

A

Unite la **sacca da letto grande H 9430-30** con la vostra sacca da fissare alla gamba. Quindi aprite la valvola di quest'ultima per far defluire l'urina.

B

Attaccate la **sacca da letto H 9430-30** direttamente al catetere esterno.



Rimuovere il condom urinario

Cambiate il condom urinario dopo massimo 24 ore. Staccate la sacca urinaria dal condom e arrotolate quest'ultimo sul pene.

Consiglio

Nel caso in cui il condom fosse fortemente attaccato al pene, potete staccarlo facilmente utilizzando dell'acqua calda o un solvente (disponibile da noi).

Ecco come applicare correttamente il condom urinario

Per gli uomini incontinenti, il condom urinario rappresenta un ausilio affidabile.

Il condom urinario raccoglie l'urina in una sacca fissata alla gamba in modo affidabile e discreto.

Con questo set di modelli, potete provare ad applicare il condom urinario. E se la prima volta qualcosa dovesse andar storto: nessun problema! Con il tempo, riuscirete ad applicarlo con sempre maggior sicurezza.

Nessuna misura del set di modelli fa al caso vostro? Vi invieremo ulteriori misure gratuitamente.

Ecco come contattarci:

Dal lunedì al venerdì

Dalle ore 07.00 alle ore 17.00

+41 56 484 15 00

www.publicare.ch



Publicare AG
Vorderi Böde 9
5452 Oberrohrdorf

Telefono +41 56 484 15 00

Fax +41 56 484 15 11

info@publicare.ch

www.publicare.ch

Nel set di modelli



Rasoio monouso
Mediware
4PY0715



Calibro
Hollister



Laccio per sacca da gamba
Hollister
H 9625



Sacca da fissare alla gamba da 500 ml
Hollister
H 9652



Sacca da letto da 2000 ml
Hollister
H 9430-30

Tutti i cateteri esterni



Sauer Comfort

Lunghezza ridotta 30 mm SA 97.6001.30
Lunghezza standard 30 mm SA 97.30



Hollister InCare InView Special

Lunghezza ridotta 25 mm H 97125
Lunghezza standard -



Hollister InCare InView Standard

Lunghezza ridotta -
Lunghezza standard 29 mm H 97229