



Renforts adhésifs pour
stomie Genii™

Génial pour plus de sécurité

trio
Genii™





Élargissez la sécurité de votre poche de stomie avec nos renforts adhésifs en silicone doux.

Les renforts adhésifs pour stomie Genii™ sont conçus pour entourer la plaque et créer une barrière douce, souple et invisible qui épouse votre corps pour encore plus de sécurité.



Très adhérents

Adaptés à toutes les activités, formes de corps et températures.



Confortables

Barrière ultrafine et invisible pour utilisation immédiate.



Résistants à l'eau

Idéaux pour nager, se baigner et pour les vacances.



Très souples

Vous laissent entièrement libre dans vos mouvements.



Doux

Se retirent sans douleur et sans laisser de résidus



Prolongent l'utilisation

Augmentent la durée d'utilisation de votre poche.

Pourquoi la Sil2 Breathable Silicone Technology® est-elle bonne pour la peau ?

Sil2 Breathable Silicone Technology® est un composé de silicone adhésif unique qui respire comme de la peau naturelle et y ressemble. Il colle très bien mais n'absorbe pas l'humidité. Ainsi, il ne gonfle pas, ne ramollit pas, ne devient pas gluant, et n'est pas douloureux à retirer. Ce qui signifie que vous pouvez le porter plus longtemps sans craindre les fuites.




Comment utiliser les renforts adhésifs Genii™


Pour une application facile et une bonne adhésion à la peau et au support de poche, ne retirez pas tout le film protecteur avant de coller et observez bien les instructions d'application 1 et 2.

1. Installez votre poche de stomie normalement. Veillez bien à ce que la peau autour du support de poche soit sèche car **les renforts adhésifs ne collent pas sur une peau humide.**

2. Retirez le film transparent marqué « 1 » du renfort adhésif Genii™.

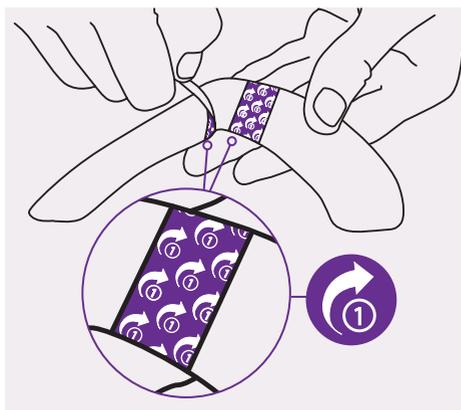

3. Collez fermement le renfort adhésif Genii™ à cheval sur la peau et la plaque.

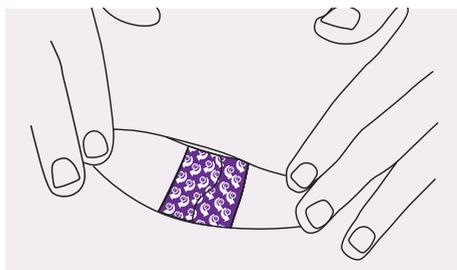

4. Retirez la protection en papier marquée « 2 », puis lissez le renfort adhésif à la main.



Répétez cette procédure avec le second renfort. Vous pouvez placer les renforts adhésifs Genii™ de la manière qui vous procurera les meilleurs résultats.



Prêt à vous faire prescrire des renforts adhésifs pour stomie Genii™ ?

Nos renforts adhésifs font partie de toute une gamme de solutions de soin de la peau Genii™ disponibles chez Publicare. Si vous avez des questions, Publicare se fera un plaisir de vous aider.

Les renforts adhésifs Genii™ existent en taille unique qui s'adapte à toutes les tailles et formes de poche de stomie.

Renforts adhésifs Genii™

Référence Taille Diamètre de la stomie Unité d'emballage

TR1060	—	Tous	20
--------	---	------	----

Anneaux protecteurs Genii™

Référence Taille Diamètre de la stomie Unité d'emballage

TR1020	Petit	20-35mm	30
TR1028	Moyen	35-50mm	30
TR1035	Grand	50-80mm	30

Anneaux protecteurs convexes Genii™

Référence Taille Diamètre de la stomie Unité d'emballage

TR1020CX	Petit	20-35mm	10
TR1030CX	Grand	30-50mm	10

Vous avez des fuites ?
 Votre plaque ou votre anneau devient gluant et collant à proximité de la stomie? La peau sous votre plaque est irrégulière, sensible, rougie ou douloureuse ? **Les anneaux protecteurs pour stomie Genii™** sont faciles à appliquer. Ils s'étirent tout simplement autour de votre stomie, sans avoir à être chauffé et sans mise en forme puis se rétractent pour épouser la stomie. Contactez-nous dès aujourd'hui pour en savoir plus ou commander votre échantillon gratuit.

●●● publicare

www.publicare.ch

056 484 15 00

info@publicare.ch

