



Rinforzi adesivi per
stomia Genii™

Un genio per
una maggior
sicurezza

trio
Genii™





Prolungate la sicurezza della vostra sacca per stomia con i rinforzi adesivi in morbido silicone.

I rinforzi adesivi Genii™ sono progettati per essere posizionati intorno alla placca creando una guarnizione morbida, flessibile e invisibile in grado di adattarsi alla forma del vostro stoma e garantire maggior sicurezza.



Perfetta aderenza

Si adatta a qualsiasi attività, forma del corpo o temperatura.



Confortevole

Strato ultrasottile e invisibile per un utilizzo immediato.



Impermeabile

Ideale per nuotare, fare il bagno e trascorrere le vacanze..



Molto flessibile

Consente di muoversi liberamente e facilmente.



Delicato

Si rimuove senza dolore e non lascia residui.



Dura più a lungo

Aumenta la durata di utilizzo della vostra sacca.

Perché Sil2 Breathable Silicone Technology® è un'ottima soluzione per la pelle?

Sil2 Breathable Silicone Technology® è una miscela unica di silicone adesivo che si avverte e traspira proprio come la pelle normale. Aderisce in modo intelligente, senza assorbire l'umidità. Quindi non si gonfierà, non diventerà molliccio, appiccicoso e non causerà dolore al momento di rimuoverlo. Questo significa che è possibile indossarlo più a lungo senza preoccuparsi di eventuali perdite.




Come si utilizzano i rinforzi adesivi Genii™


È importante non rimuovere completamente la pellicola protettiva prima dell'applicazione e seguire la guida nei punti 1 e 2 per assicurare una facile applicazione e un'adesione sicura alla pelle e alla placca.

1. Applicare la sacca per lo stoma come di consueto. È importante assicurarsi che l'area intorno alla placca sia asciutta, perché **il rinforzo adesivo non aderisce alla pelle bagnata.**

2. Rimuovere la pellicola protettiva trasparente, contrassegnata con il numero 1, dal rinforzo adesivo Genii™.

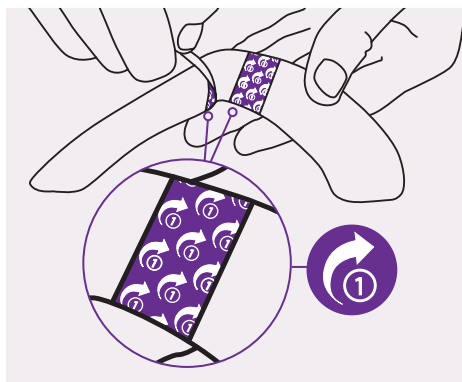

3. Posizionare il rinforzo adesivo Genii™ in modo sicuro sulla pelle e intorno alla placca.

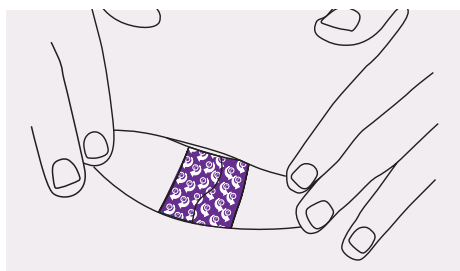

4. Rimuovere la pellicola protettiva di carta, contrassegnata con il numero 2, e stendere il rinforzo.



Potete fare lo stesso con un secondo rinforzo. I rinforzi adesivi Genii™ possono essere collocati in diverse posizioni per ottenere i migliori risultati.



Pronti per far aggiungere i rinforzi adesivi per stomia Genii™ alla vostra prescrizione?

I nostri rinforzi adesivi fanno parte di una gamma completa di soluzioni Genii™ per la cura della pelle, disponibili da Publicare. Se hai delle domande, Publicare sarà felice di aiutarti.

I rinforzi adesivi Genii™ sono disponibili in taglia unica, adattabile a tutte le dimensioni e le forme delle sacche per stoma.

Rinforzi adesivi Genii™

Codice	Dimensione	Dimensione stomia	Dimensione confezione
TR1060	—	Tuto	20

Anelli protettivi Genii™

Codice	Dimensione	Dimensione stomia	Dimensione confezione
TR1020	Small	20–35mm	30
TR1028	Midi	35–50mm	30
TR1035	Large	50–80mm	30

Anelli protettivi convessi Genii™

Codice	Dimensione	Dimensione stomia	Dimensione confezione
TR1020CX	Small	20–35mm	10
TR1030CX	Large	30–50mm	10



Avvertite delle perdite?

La vostra placca o il vostro anello diventano appiccicosi e viscidati intorno allo stoma? La pelle sotto la vostra placca non è ben distesa, è sensibile, rossa o irritata? **Gli anelli protettivi per stomia Genii™** sono facili da applicare. Si stendono semplicemente intorno allo stoma senza bisogno di riscaldarli o dargli una forma, dopodiché si modellano per garantire una vestibilità personalizzata. Contattateci oggi stesso se desiderate maggiori informazioni o per ordinare il vostro campione gratuito.

●●● **publicare**

 www.publicare.ch

 056 484 15 00

 info@publicare.ch

