



Anneaux protecteurs Genii™

Génial pour prévenir les fuites

trio
Genii™





Le premier anneau protecteur pour stomie en silicone qui s'adapte parfaitement.

Les anneaux protecteurs Genii™ existent sous formes plate et convexe pour leur permettre de s'adapter à tous les types de stomies.



Épouse la stomie

S'adapte autour de la stomie, sans interstices ni fuites.



Confortable et fermement fixé

Suit les mouvements du corps.



Rapide et facile à poser

Il suffit de l'étirer pour l'adapter à la stomie, sans avoir à être chauffé ni modelé.



Protège la peau sensible autour de la stomie

Protège de l'urine et des selles pour laisser la peau guérir naturellement et rester saine.



Prolonge l'utilisation

Sil2 Breathable Silicone Technology® n'absorbe pas les fluides corporels, ainsi, l'anneau ne devient ni gluant, ni ramolli, ni défectueux.

**ÉGALEMENT
DISPONIBLE**

Anneaux protecteurs convexes Genii™

Idéaux pour les stomies plates ou inversées ou les peaux irrégulières.

Pourquoi la Sil2 Breathable Silicone Technology® est-elle bonne pour la peau ?


Sil2 Breathable Silicone Technology® est un composé de silicone adhésif unique qui respire comme de la peau naturelle et y ressemble. Il colle très bien mais n'absorbe pas l'humidité. Ainsi, il ne gonfle pas, ne ramollit pas, ne devient pas gluant, et n'est pas douloureux à retirer. Ce qui signifie que vous pouvez le porter plus longtemps sans craindre les fuites.




Comment utiliser un anneau protecteur Genii™

1. Nettoyez la peau autour de la stomie, en veillant bien à ce qu'elle soit sèche car **l'anneau ne colle pas sur peau humide**.

2. Saisissez l'anneau entre le pouce et l'index, et retirez-le précautionneusement de son emballage. Il est normal que l'anneau colle à son emballage ; mais il est assez résistant pour que vous puissiez le décoller en tirant dessus sans l'abîmer.

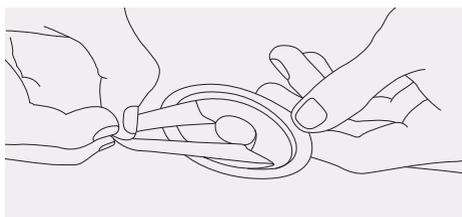


3. Prenez l'anneau dans vos deux mains et étirez-le autour de la stomie. Vous pouvez ensuite le relâcher et le laisser se rétracter autour de la stomie pour former un joint confortable.

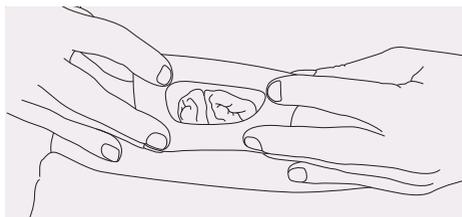

4. L'anneau Genii™ s'étire pour s'adapter à la stomie. Il n'est donc pas besoin de lui donner forme. Son élasticité va doucement enserrer la stomie pour former le joint.

5. Une fois serré autour de la stomie, pressez délicatement l'anneau Genii™ sur votre peau pour bien le coller. Placez la poche de stomie directement sur l'anneau, puis maintenez-la en place jusqu'à ce qu'elle semble bien fixée.

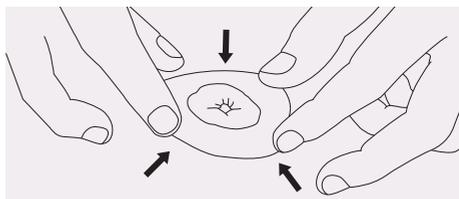

CONVEXE



CONCAVE

Les anneaux convexes sont polyvalents et peuvent être appliqués de la façon qui vous convient le mieux : face convexe vers le haut ou vers le bas de sorte qu'une simple pression douce directement autour de la stomie permette d'obtenir une bonne adhésion.



Prêt à vous faire prescrire des anneaux protecteurs Genii™ ?

Nos anneaux protecteurs plats et convexes font partie de toute une gamme de solutions de soin de la peau Genii™ disponibles chez Publicare. Si vous avez des questions, Publicare se fera un plaisir de vous aider.

Peu importe que votre stomie change de forme et de taille, nos anneaux s'adaptent pour l'épouser. Sélectionnez simplement la dimension de votre stomie, puis la taille – petite, moyenne ou grande – de votre anneau.

Anneaux protecteurs Genii™

Référence Taille Diamètre de la stomie Unité d'emballage

TR1020	Petit	20-35mm	30
TR1028	Moyen	35-50mm	30
TR1035	Grand	50-80mm	30

Anneaux protecteurs convexes Genii™

Référence Taille Diamètre de la stomie Unité d'emballage

TR1020CX	Petit	20-35mm	10
TR1030CX	Grand	30-50mm	10

Renforts adhésifs Genii™

Référence Taille Diamètre de la stomie Unité d'emballage

TR1060	—	Tous	20
--------	---	------	----



Vous voulez plus de sécurité ?

Vous avez peut-être une hernie, une vie très active, ou vous voulez tout simplement dormir sur vos deux oreilles. Les renforts adhésifs Genii™ sont conçus pour entourer le support et créer une barrière douce, souple et invisible qui épouse votre corps pour encore plus de sécurité. Contactez-nous dès aujourd'hui pour en savoir plus ou commander votre échantillon gratuit.

●● publicare

 www.publicare.ch

 056 484 15 00

 info@publicare.ch

