



Anelli protettivi per
stomia Genii™

Un genio per prevenire le perdite

trio
Genii™





Il primo anello protettivo in silicone per stomia che garantisce una perfetta aderenza.

Gli anelli protettivi Genii™ sono disponibili in versione piana e convessa per adattarsi a tutti i tipi di stoma.



Vestibilità comoda e personalizzata

Circonda lo stoma, eliminando pieghe e perdite.



Confortevole e sicuro

Risponde ai movimenti del corpo.



Facile e veloce da applicare

Si stende semplicemente intorno allo stoma senza doverlo riscaldare o modellare.



Protegge la pelle delicata intorno allo stoma

Protegge da feci e urina, permettendo alla pelle di guarire naturalmente e rimanere sana.



Dura più a lungo

Il prodotto esclusivo Sil2 Breathable Silicone Technology® non assorbe i fluidi corporei, quindi non diventa appiccicoso, molliccio e non si rompe.

DISPONIBILE ANCHE Anelli protettivi convessi Genii™

Ideali per stomi piatti o invertiti o pelle irregolare.

Perché Sil2 Breathable Silicone Technology® è un'ottima soluzione per la pelle?


Sil2 Breathable Silicone Technology® è una miscela unica di silicone adesivo che si avverte e traspira proprio come la pelle normale. Aderisce in modo intelligente, senza assorbire l'umidità. Quindi non si gonfierà, non diventerà molliccio, appiccicoso e non causerà dolore al momento di rimuoverlo. Questo significa che è possibile indossarlo più a lungo senza preoccuparsi di eventuali perdite.




Come si usa un anello protettivo Genii™

1. Pulire la superficie intorno allo stoma: è importante assicurarsi che la cute sia asciutta perché **l'anello non aderirà sulla pelle bagnata.**

2. Usando il pollice e l'indice, estraete con cautela l'anello dalla sua confezione. È normale che l'anello sia fissato al blister, ma è abbastanza robusto da poterlo tirare e liberare senza causare danni.

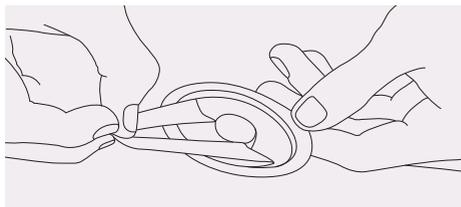


3. Prendete i bordi dell'anello con entrambe le mani e allungatelo intorno allo stoma. Potete quindi lasciare che l'anello si modelli intorno allo stoma per formare una barriera confortevole.

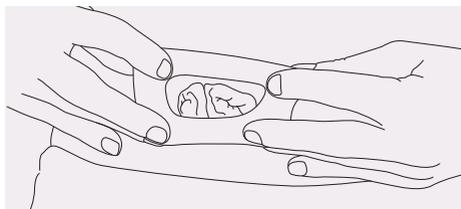

4. L'anello protettivo Genii™ si allunga per adattarsi allo stoma. Quindi non c'è bisogno di dargli la forma.

La sua delicata elasticità circonda lo stoma per formare una barriera.

5. Una volta che ha aderito intorno allo stoma, premere delicatamente l'anello protettivo Genii™ sulla pelle. Posizionare la sacca per lo stoma direttamente sull'anello come di consueto e mantenerla in posizione finché non la si percepisce sicura.

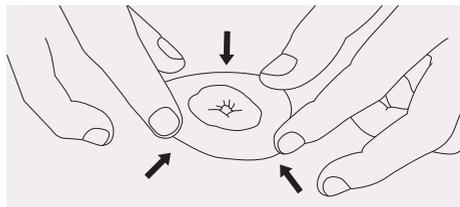

CONVESSI



CONCAVI

Gli anelli convessi sono versatili e possono essere applicati in due modi, ossia con il lato convesso rivolto verso l'alto o verso il basso, in modo da poter applicare una delicata pressione direttamente intorno allo stoma per creare una barriera sicura, a seconda delle sensazioni personali.



Pronti per far aggiungere gli anelli protettivi Genii™ alla vostra prescrizione?

I nostri anelli piatti o convessi fanno parte di una gamma completa di soluzioni Genii™ per la cura della pelle, disponibili da Publicare. Se avete delle domande, Publicare sarà felice di aiutarvi.

Il vostro stoma può cambiare forma e dimensione, ma i nostri anelli si flettono e si muovono insieme ad esso. Scegliete semplicemente la misura migliore per voi selezionando le dimensioni del vostro stoma, optando tra small, midi o large.

Anelli protettivi Genii™

Codice	Dimensione	Dimensione stomia	Dimensione confezione
TR1020	Small	20-35mm	30
TR1028	Midi	35-50mm	30
TR1035	Large	50-80mm	30

Anelli protettivi convessi Genii™

Codice	Dimensione	Dimensione stomia	Dimensione confezione
TR1020CX	Small	20-35mm	10
TR1030CX	Large	30-50mm	10

Rinforzi adesivi Genii™

Codice	Dimensione	Dimensione stomia	Dimensione confezione
TR1060	—	Tuto	20

Avete bisogno di una sicurezza extra?
Potreste avere un'ernia, fare molta attività fisica o desiderare di dormire tranquilli. I rinforzi adesivi Genii™ sono progettati per essere posizionati intorno alla placca, creando una guarnizione morbida e flessibile, in grado di adattarsi alla forma del vostro corpo per garantire una sicurezza extra. Contattateci oggi stesso se desiderate maggiori informazioni o per ordinare il vostro campione gratuito.

••• publicare

www.publicare.ch

056 484 15 00

info@publicare.ch

